

## 警告


- 請教您的專業醫護人員其他部位檢測 (AST) 是否適合您。
- 請勿根據您的 AST 結果校準動態血糖監測儀。
- 請勿基於 AST 結果計算胰島素劑量。

### 在以下情況下不可進行 AST：

- 如果您認為您的血糖過低 (低血糖)。
- 當血糖正在迅速變化時 (用餐、注射胰島素或運動之後)。
- 如果您無法察覺低血糖的症狀 (無知覺性低血糖)。
- 如果您僅取的其他部位血糖的測量結果與您的感覺不相符。
- 在生病或承受壓力期間。
- 如果您將要駕車或操作機械。

## 潛在的生物危害

- MICROLET®NEXT 採血筆僅供單人患者自我測試使用。由於可能造成感染風險，不得用於超過一人。
- 請勿重複使用採血針。用過的採血針非無菌。每次檢測都使用新的採血針。
- 請始終將用過的試紙和採血針作為醫用廢棄物或按專業醫護人員的意見處置。
- 在檢測或處理血糖儀、採血筆或試紙之前和之後，請務必用肥皂和清水清洗雙手並充分擦乾。

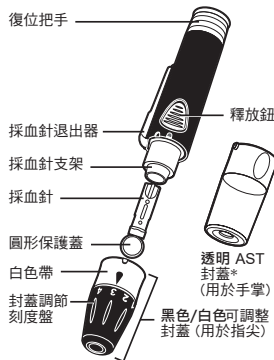


\*可能並不是包括在所有的套件內。  
客戶服務部門可應要求提供。

## 準備採血筆

警告：避免兒童觸及。如不慎吞服此套件中的小部件，可能引起窒息。

- 用肥皂和溫水清洗雙手和針刺部位。徹底洗淨並擦乾。
- 解開封蓋。扭轉白色帶使得白色凸起標記和黑色下凹標記如所示排成一列。
- 拉掉封蓋。

- 將保護蓋轉 1/4 圈但是不要取下該保護蓋，來鬆開採血針上的圖形保護蓋。

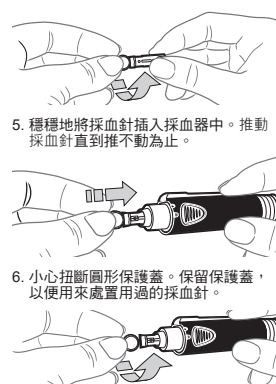

## 取得血樣 - 指尖

### 指尖檢測

使用黑色/白色可調整封蓋。  
請勿使用透明 AST 封蓋。


- 裝上黑色/白色可調整封蓋。
- 鎖上封蓋。扭轉白色帶直到您聽到或感覺到咔嚓一聲並且白色和黑色凸起標記如所示排成一列。



- 旋轉封蓋調節刻度盤以調整針刺深度。對針刺部位施加的壓力也會影響針刺的深度。



- 將復位把手往後拉以準備採血筆。排空空氣時，釋放鈕會凸起。

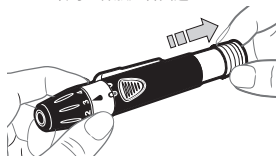


- 將採血筆緊緊地按在手指的一側並按釋放鈕直到聽到採血筆咔嚓聲。



- 朝針刺部位按摩您的手和手指以形成一滴血樣。請勿按壓針刺部位周圍。



- 在小的圖形血樣形成 (如所示) 後，立即進行檢測。

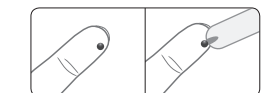

- 用一張乾淨的乾紙巾擦拭針刺部位並維持對該部位施壓直到流血停止。

## 退出/處置採血針

請將用過的採血針作為醫用廢棄物或按專業醫護人員的意見處置，以避免對他人造成傷害或污染。每次檢測都使用新的採血針。請勿重複使用採血針。

您的 MICROLET NEXT 採血筆配有一個採血針退出器。請勿用手將採血針從採血筆取出。



- 小心地從採血筆取下封蓋。扭轉封蓋的白色帶使得白色凸起標記和黑色下凹標記排成一列。拉掉封蓋。




- 將您保存的圖形保護蓋放到平坦的表面上。在用過的採血針仍然在採血筆內的情況下，將採血針推入保護蓋的中央。



續見背面

3. 將採血筆指向裝尖銳物件的容器（例如，附有蓋子的空塑膠瓶）。正確用標籤標明該容器並避免孩童觸及。
4. 將灰色採血針退出器向前推直到採血針掉入容器，接著將退出器往後滑動。

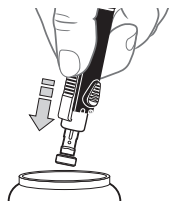

5. 裝上並鎖上封蓋。扭轉白色帶以鎖上。

## 取得血樣 - 手掌

### 其他部位檢測 (AST) 手掌

使用透明 AST 封蓋。

1. 按準備採血筆所述插入採血針。
2. 裝上和鎖上透明 AST 封蓋。扭轉白色帶直到您聽到或感覺到咔嚓一聲並且白色和黑色凸起標記如所示排成一列。

「咔嚓」一聲鎖上



注意事項：請勿將透明 AST 封蓋用於指尖上。

3. 從手掌上的多肉區域選擇針刺部位。避開靜脈、痣、骨頭和肌腱。



4. 將復位把手往後拉以準備採血筆。當採血筆就緒時，釋放鈕會凸起。
5. 將採血筆緊緊按在針刺部位上，然後按下釋放鈕直到聽到採血筆咔嚓聲。




（如果採血筆沒有刺穿，重複步驟 4 以復位。）

6. 請勿將採血筆拿離開您的手掌。維持穩定的壓力直到一個小的圓形血樣在透明封蓋下形成。



7. 將採血筆以垂直方向向上抬起並遠離皮膚，不要塗抹到血樣。
8. 立即檢測。

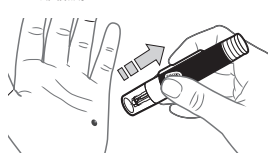

若血樣發生下列情形，請勿檢測自手掌取得的血樣：

- 被塗抹到的血樣
- 流散的血樣
- 凝結的血樣
- 清血液體與血樣相混

9. 用一張乾淨的乾紙巾擦拭針刺部位並維持對該部位側邊施壓直到流血停止。


參見：退出/處置採血針

## 清潔

一個星期清潔您的採血筆一次。使用以 70% 異丙醇（可在藥房購得）沾濕的布。請勿使用漂白水（次氯酸鈉）。

清潔所需用品：

- 以 70% 異丙醇（可在藥房購得）沾濕的布
- 紙巾

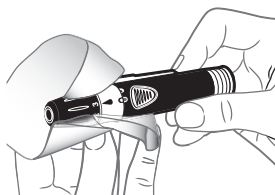

## 客戶服務部

保固：您的採血筆保固 5 年。

如果您需要協助或對於血糖檢測有任何疑問，請聯絡客戶服務部門，聯絡電話為 (852) 8100 6386（香港）與 0800 698 658（台灣）。

MICROLET®NEXT 採血筆：

LANCING DEVICE = 採血筆

AST = 其他部位檢測 (AST)

MICROLET® 採血針：

LANCETS = 採血針

STERILE R = 使用輻射滅菌

MICROLET NEXT 採血筆於波蘭製造。


Ascensia - Ascensia Diabetes Care 標誌、Contour、Glucofacts、Microlet、No Coding 標誌和 Second-Chance 是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG（安晟信醫療科技控股公司）的商標和/或註冊商標。

所有其他商標皆為其各自所有者的財產並且僅可作為資訊性用途使用。不應推斷或暗示任何關係或背書。

© 2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

保留所有權利。

Microlet®  
next 採血筆

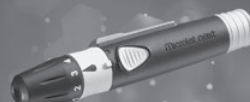

### 說明插頁

- 保留採血針退出器，以便用來處置用過的採血針。
- 黑色/白色可調整封蓋僅用於指尖檢測。
- 透明 AST 封蓋僅用於其他部位檢測。
- MICROLET®NEXT 採血筆和 MICROLET® 採血針用來從指尖或手掌抽取末細管血樣，用於血糖檢測。

用於指尖和手掌檢測

Ascensia Diabetes Care Singapore Pte Ltd  
600 North Bridge Road  
#06-01 Parkview Square  
Singapore 188778  
Tel: +65 62042470

Ascensia Diabetes Care Malaysia Sdn Bhd  
Lot 2-2, Level 2, Tower B  
The Troika  
19 Persiaran KLCC,  
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Ascensia Diabetes Care Hong Kong Limited  
Unit No. 12-13, Level 13, Tower 1, Millennium City 1  
No. 388 Kwan Tong Road,  
Kwan Tong, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: (852) 8100 6386  
Fax: (852) 2320 7022  
diabetes.ascensia.hk

健康醫療保健香港有限公司  
九龍觀塘道388號

創紀之城第一期一座31樓12-13室

電話: (852) 8100 6386

傳真: (852) 2320 7022

diabetes.ascensia.hk

總商名稱：臺灣安晟信醫療公司

聯絡地址：台北市萬壽路5段73號37樓

台灣客戶服務電話：0800 698 658

電郵：diabetescare@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Peter Merian-Strasse 90

4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA  
Diabetes Care

如需關於專利和相關許可的資訊，請  
瀏覽 www.patents.ascensia.com

90003353 Rev. 03/19

CE  
2797

